

CEDERROTH



BURN COVER

Protegge le piccole bruciature alleviando il dolore. Il tampone è costituito da un fresco idrogel che riveste le fibre nervose cutanee contribuendo ad alleviare il dolore. Allo stesso tempo, crea un ambiente umido che contrasta la formazione di croste favorendo la guarigione. Il tampone non aderisce alla ferita.

Burn Cover è ideale anche per piccoli tagli e abrasioni.

Il colore blu di Cederroth Burn Cover lo rende più visibile e adatto agli addetti dell'industria alimentare.

La scatola è adatta alle stazioni di Primo Soccorso Cederroth.

ACCESSORI » PRIMO SOCCORSO » MEDICAZIONE

BURN COVER

Cod. **111110**

Cerotti primo soccorso per bruciature

Specifiche:

- Cerotto con tampone in idrogel a base acquosa
- Protegge le piccole bruciature alleviando il dolore
- Favorisce la guarigione
- Non aderisce alla ferita
- Ideale anche per piccoli tagli e abrasioni
- Confezione da 10 cerotti sterili 74 mm x 45 mm
- Colore blu per maggior visibilità, adatto per lavoratori dell'industria alimentare
- Idoneo per stazioni di Primo Soccorso Cederroth

Unità minima 1 confezione

Cartone da 10 confezioni

Campi d'impiego:

- Da utilizzare in situazioni di primo soccorso su piccole bruciature
- Ideale anche per piccoli tagli e ferite

Info Tecniche

Articolo	BURN COVER
Codice	111110
Colore	blu
Certificazioni	non DPI

Consigli per l'uso

Prima di applicare Burn Cover, raffreddare la bruciatura per almeno 20 minuti ad esempio con Cederroth Burn Gel, o risciacquarla con acqua tiepida.

Non utilizzare su bruciature estese o gravi né su ferite infette o sanguinanti.

Sostituire il cerotto e pulire la ferita giornalmente.

Se il cerotto si asciuga, inumidirlo prima di rimuoverlo.

Consultare un medico se insorgono complicazioni

Conservazione

I cerotti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.